

Hoe u de On-body Injector controleert

- ❖ Gedurende de eerste 27 uur dat u uw On-body Injector draagt, zou u een langzaam knipperend groen lampje moeten zien.
- ❖ Twee minuten voordat de dosistoediening start, hoort u een reeks piepjes. Verwijder de On-body Injector niet.
- ❖ Wanneer de dosistoediening start ziet u een snel knipperend groen lampje. Verwijder de On-body Injector niet.
- ❖ Het duurt 45 minuten om de dosis toe te dienen.
- ❖ Wanneer de dosistoediening is voltooid, hoort u een lange pieptoon en brandt het statuslampje continu groen.
- ❖ Verwijder de On-body Injector langzaam en controleer of deze leeg is.


- Neem onmiddellijk contact op met uw zorgverlener als er problemen zijn met de On-body Injector of als u symptomen van een infectie heeft zoals koorts, rillingen of zweten.
- Probeer de On-body Injector niet opnieuw aan te brengen of vast te maken als deze los raakt.

5


Neem in de volgende gevallen onmiddellijk contact op met uw zorgverlener - u heeft misschien niet uw volledige dosis gekregen:

- Het statuslampje knippert rood.

Rood knipperend statuslampje

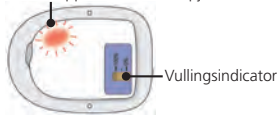

- De plakker (het deel dat uw huid raakt) is merkbaar nat en/of er druppelt vloeistof uit.

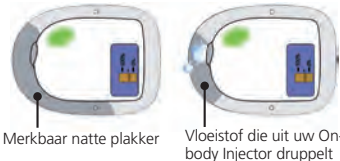


Probeer de On-body Injector NIET opnieuw vast te maken als deze losraakt of breng hem onder geen enkele omstandigheid opnieuw aan.

6

- De plakker raakt los van de huid vóór het einde van de dosistoediening.



- Na de 45 minuten durende dosistoediening staat de streep niet naast '0%' op de vullingsindicator.

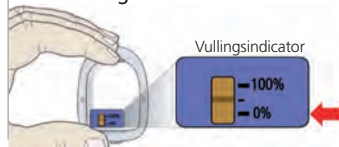

7

Neulasta® (pegfilgrastim)

On-body Injector Patiëntenkaart

- ❖ Open de kaart en lees beide zijden.
- ❖ Houd de kaart bij u.
- ❖ Deze kaart bevat belangrijke veiligheidsinformatie die u nodig heeft wanneer u behandeld wordt met de pegfilgrastim On-body Injector.
- ❖ Toon deze kaart aan uw zorgverlener indien u dringend medische advies nodig heeft voor de On-body Injector.

Belangrijke informatie

Het doel van deze kaart is om medicatiefouten te helpen voorkomen, - voornamelijk onderdosering van het geneesmiddel.

- ❖ Een onderdosering kan voorkomen als de On-body Injector los raakt van de huid, lekt of door andere storingen.
- ❖ Indien dit gebeurt, kunt u een verhoogd risico hebben op een ernstige infectie.

Meer informatie:

- ❖ Lees de bijsluiter die bij uw On-body Injector is toegevoegd.

De volgende zaken kunnen de werking van de On-body Injector verstoren:

- ❖ Trek **niet** aan de On-body Injector en stoot er **niet** tegenaan.
- ❖ Houd lotions, crèmes, oliën of reinigingsmiddelen **uit de buurt** van de On-body Injector.
- ❖ Zorg dat u tijdens het slapen **niet** op de On-body Injector ligt of dat u er druk op uitoefent tijdens het dragen.
- ❖ Stel de On-body Injector **niet** bloot aan CT scan, MRI, röntgenonderzoek, echografie, radiotherapie of hyperbare kamers.
- ❖ Draag loszittende kleding en wees voorzichtig met omkleden.
- ❖ Houd de On-body Injector minstens 10 cm uit de buurt van elektrische apparaten zoals mobiele telefoons of magnetrons.

Lees deze kaart en houd hem bij u.

Deze informatie moet worden ingevuld door uw zorgverlener.

Uw On-body Injector werd aangebracht op uw huid op:

Datum

Tijdstip

De dosistoediening begint ongeveer op:

Datum

Tijdstip

On-body Injector lot nummer:

Contactgegevens in geval van nood

Naam en telefoonnummer van uw zorgverlener:

Naam

Telefoonnummer

Contactgegevens spoedeisende zorg buiten kantooruren: